

GOCCE OCULARI IDRATANTI E LUBRIFICANTI

Secchezza oculare**Anche per portatori di lenti a contatto**

Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica sterile ad effetto idratante e lubrificante, contenente acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di origine biotecnologica ad alto peso molecolare. L'acido ialuronico sale sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni del film lacrimale, ne ristabilisce l'equilibrio. La sua concentrazione allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. È quindi indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati da secchezza oculare. **Irilens 0,4% gocce oculari** contiene inoltre sodio idrossimetilglicinato (NIG) come sistema conservante. **Non contiene benzalconio cloruro. Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto.**

DESTINAZIONE D'USO

Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica lubrificante e idratante indicata in tutti i casi in cui si presentano disturbi causati da secchezza oculare. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare possono essere:

- Uso di lenti a contatto
- Motivi ambientali: sole, vento, freddo, locali fumosi, locali con aria secca prodotta da impianti di riscaldamento o da condizionamento
- Uso di personal computer
- Età avanzata
- Terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, ormoni e antistaminici
- Chirurgia oculare

ISTRUZIONI PER L'USO

- Aprire il flacone.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore: il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 28 giorni dopo la prima apertura.
- Il prodotto in flacone è monopaziente.
- Ripetere, se necessario, l'operazione 2-4 volte al giorno.
- I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato.

cinato, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, EDTA, acqua per preparazioni iniettabili.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE

Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.

- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista dovuto alla densità della soluzione, che comunque scompare molto rapidamente.

EFFETTI COLLATERALI

Ad oggi non sono stati segnalati effetti collaterali.

C O N F E Z I O N E

Flacone polidose contenente 10 ml di soluzione sterile.

V A L I D I T À

A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul flacone.

Data ultima revisione: Settembre 2013

 **COC Farmaceutici s.r.l.**
Via Modena, 15 - Sant'Agata Bolognese (BO)
Distributore esclusivo: Montefarmaco OTC S.p.A.
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

C O M P O S I Z I O N E

Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio idrossimetilgli-

**DISPOSITIVO
MEDICO****STERILE A**